

Drap de Glisse

Guide de l'utilisateur

support@eyra.group

● CARACTÉRISTIQUES:


-Tissu: Nylon

-Dimensions : 122 cm x 102 cm

-Poids : 0,710kg

● INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Lavage en machine à l'eau froide. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine ni exposer longtemps au soleil. NE PAS utiliser d'adoucissant ni d'eau de Javel.

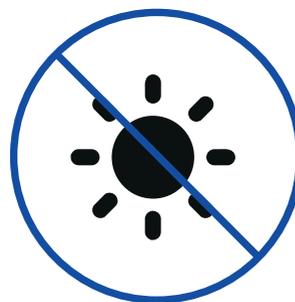


● INTRODUCTION:

Le drap de transfert Eyra avec poignées a été spécialement conçu pour aider à soulever, transférer, tourner et repositionner les patients alités. Grâce à ce drap de transfert, prendre soin des patients sera plus facile et les blessures lombaires ou dorsales inutiles pourront être évitées.

● NOTE:

1. Aider le patient à s'allonger au milieu du drap de transfert, en alignant l'épaule/l'omoplate avec la sangle la plus haute pour éviter que le corps ne se plie lors du retournement.

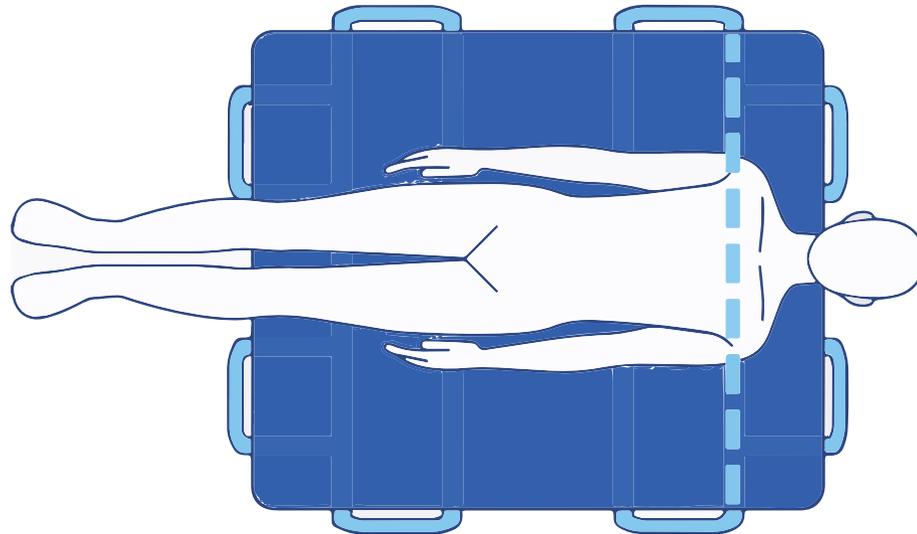


2. Lors du soulèvement du haut du corps du patient, procédez avec précaution et lentement, sinon son cou pourrait ressentir une gêne.

● **MODE D'EMPLOI:**


Étape 1.

Aidez le patient à se tourner sur le côté.

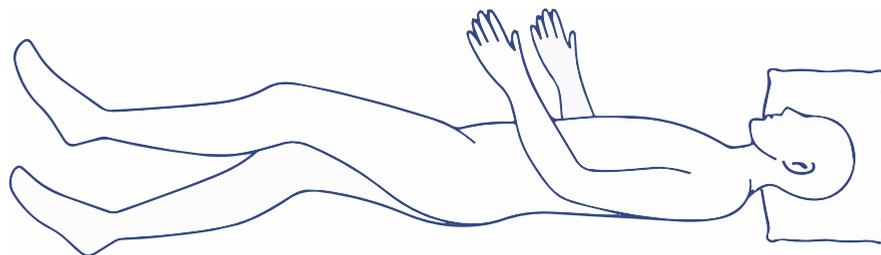



Étape 2.

Ouvrez le drap de transfert, enrroulez-le sur environ 2/3 de sa longueur et placez-le délicatement sous le patient.

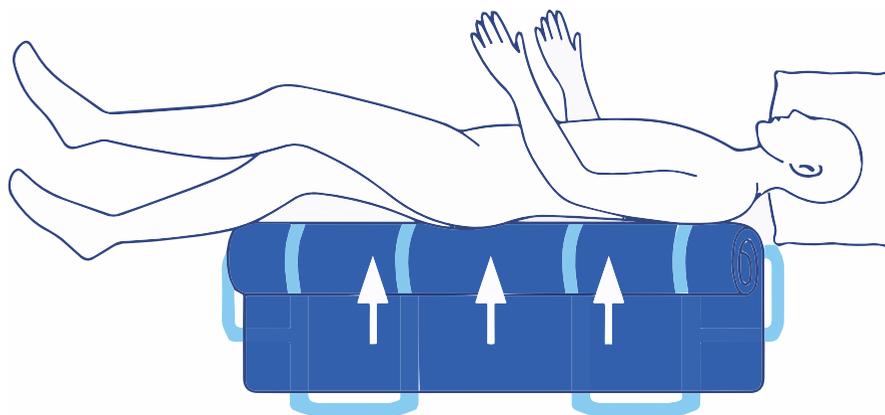


Étape 3.

Aidez le patient à se tourner sur l'autre côté et retirez
lentement la partie enroulée.

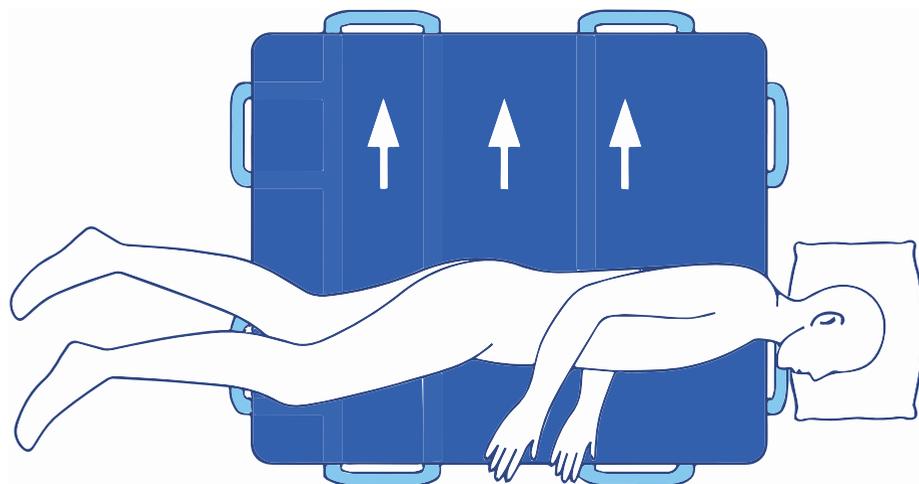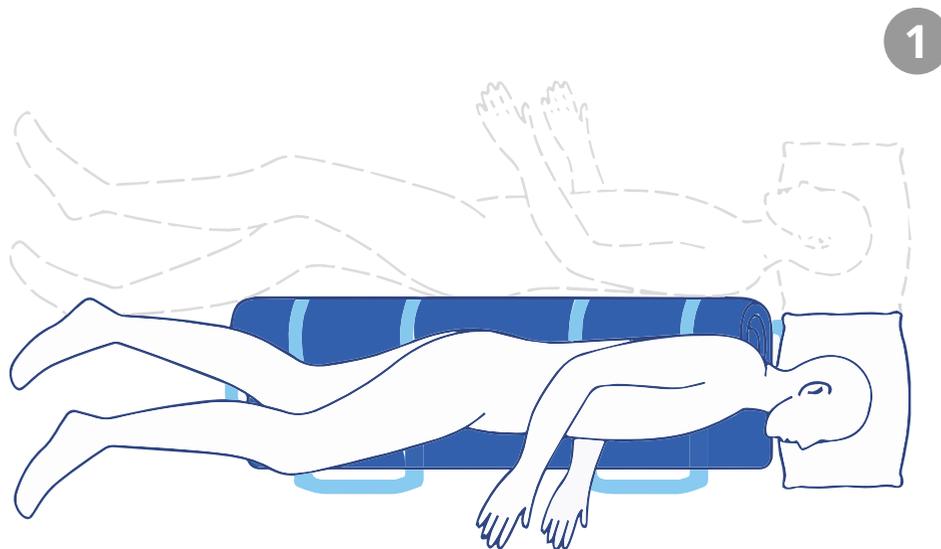


● MÉTHODES D'UTILISATION:

1. Pour soulever complètement le patient et le repositionner, deux personnes doivent travailler ensemble et soulever les poignées latérales.

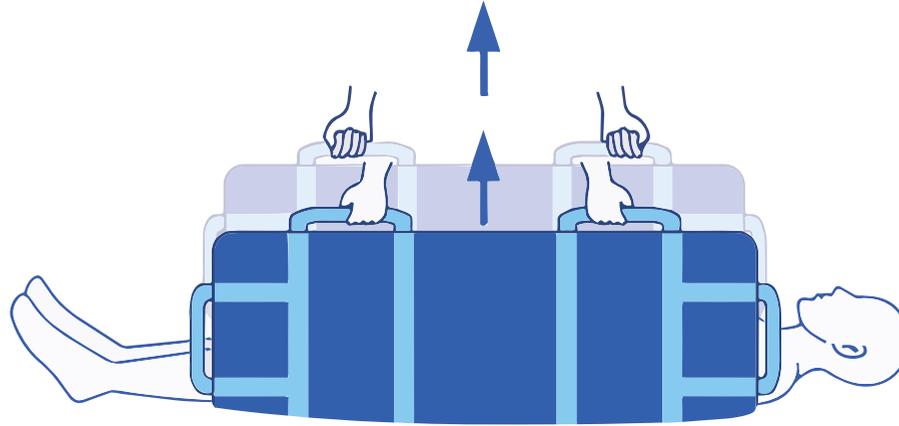

2. Pour soulever le haut du corps du patient et le maintenir en position assise, soulevez les deux poignées supérieures.

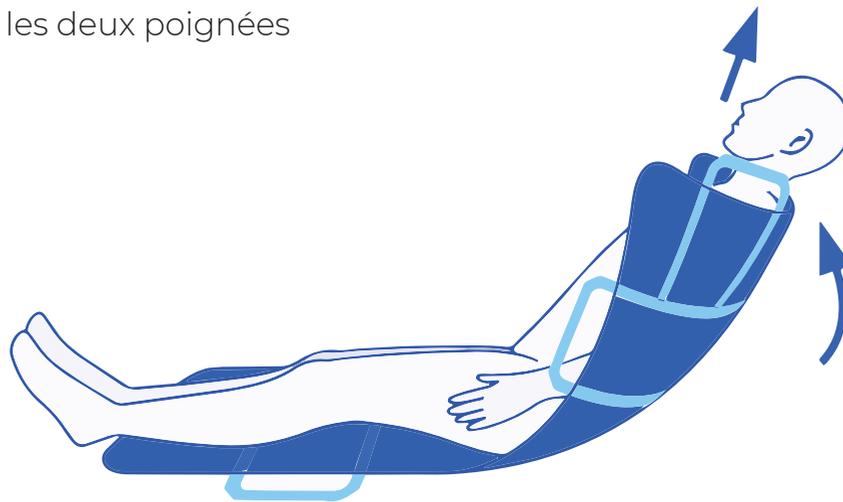

● **PRÉCAUTIONS:**

1. Cet article n'est pas 100% imperméable (l'eau peut s'infiltrer par les coutures de la sangle). En cas d'incontinence urinaire, nettoyez le plus rapidement possible pour éviter de mouiller les draps. Si nécessaire, placez une couche sur le drap de transfert.

2. Le drap de transfert est souple et doit être utilisé sur une surface de lit plane. Si vous relevez un lit réglable, pour des raisons de sécurité, nous recommandons de retirer d'abord le drap de transfert pour éviter tout glissement.